

OTORIG®

NOSNÝ SPREJ

**Efektívna terapia
nosní sliznice**

s



OZOILE®
Unikátny patent
Stabilní Ozonidy

Otorig® nosný sprej je zdravotnícky prostriedek k uvoľneniu, ochrane, redukcii mikróbov a čisteniu nosných dutín. Je určený na prevenciu a podporu liečby akútnej i chronickej afekcie nosohltanu, pri podráždení, otoku, svēdení, pálení, nadmernej tvorbe hľenu. Otorig® vytvára ochranný mukoadhezívny lipidový film a napomáha k obnoveniu optimálneho stavu nosnej sliznice.

HLAVNÉ SLOŽKY

Ozoile® (stabilní Ozonidy), Voda (Ozonizovaná), Mentol, Chlorid sodný.

OZOILE®

Působí na podrážděnou a svědivou tkáň, které dodává kyslík a vytváří prostředí, které zabraňuje změnám mikrobioty sliznice. Působí proti zarudnutí, svědění, pálení, otoku, deskvacii a proti rozvoji degenerativních procesů.

MENTOL

Osvěžující, analgetický a ulevující efekt.

CHLORID SODNÝ

Jeho přítomnost v roztoku podporuje osmózu vody z překrvené sliznice a tím uvolňuje hlen a usnadňuje jeho odstránění.

JAK FUNGUJE

Otorig® nosný sprej s Ozoile® je ochranný, dekongescíni a antimikrobiální zdravotnícky prostriedek pro nosní sliznicu, speciálne určený na prevenciu a liečbu akútnej i chronickej nasofaryngeálnej afekcie, charakterizovaných podráždením, otokom, svēdením, pálením, nadmernou tvorbou hľenu. Inovatívny zložení, ktoré pomáha v prípade chřipkového syndromu spôsobeného nachlazením, alergiami alebo látkami ve znečisteném životnom prostředí a také před a po chirurgických zákrocích v oblasti ORL. Otorig® nosný sprej uvolňuje nosní cesty, snižuje zduření sliznice a reguluje sekreci pomocí osmotické výměny, uvolňuje hlen a usnadňuje jeho odstránění. Jeho zložení s Ozoile® udržuje sliznicu dobre hydratovanou a má dôležitý antimikrobiální a ochranný účinek.


Vytváří mukoadhezívny lipidový film a chrání sliznicu před negativní změna mi mikrobioty, čímž zlepšuje stav nosných dutín.

JAK POUŽÍVAT

1) Odstráňte průhledný ochranný kryt (a) a rozprašovač (b) tahem nahoru.

2) Nasadte dávkovač nosního spreje (c) na píst.

Aplikujte Otorig® nosný sprej dle potřeby 1 nebo 2 vstřiky do každé nosní dírky, jemně se vysmrkejte a poté opakujte aplikaci znovu.

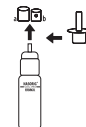

Doporučujeme prípravok používať viackrát během dne, můžete i s krátkým časovým r zastupem.

Před spaním opakujte aplikaci. Dávkovač po každém použití opláchněte p roudem horké vody a zakryte ochranným víčkem. Protože se jedná o přírodní produkt a jeho farmakologický mechanismus účinku není návykový, lze Otorig používat často a dlouhodobě.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte po vyprání expirace. Nepoužívejte je-li obal poškozený. Vyhnete se kontaktu s očima, v případě náhodného vniknutí, důkladně opláchněte vodou. Případy precitlivosti nebo vedlejších účinků nejsou známy, pokud se však objeví, přípravok dále nepoužívejte a poradte se s lékařem. Před použitím zdravotnického prostředku si důkladně umyjte ruce. Po použití lahvičku řádně uzavřete. Přípravok uchovávejte na suchém místě mimo zdroje tepla a slunečního záření. Datum expirace se vztahuje na nedotčený a dokonale uchovaný prípravok. Po otevření spotřebujte do 6 měsíců.

BALENÍ

Lahvička 20 ml.



BEZ LEPKU
BEZ ALERGENŮ
BEZ BARVIV

Rev. 02 10/2021

Zdravotnícky prostriedek.
Výhradní distributor pro ČR a SR
EMPOLAS s.r.o., Česká republika
info@empolas.com
www.ozonidy.cz

Erbagil s.r.l. - Via L. Settembrini, 13
Telese Terme (Bn) - Italy
www.erbagil.com - info@erbagil.com

OTORIG®

NOSOVÝ SPREJ

**Efektívna terapia
nosovej sliznice**

s



OZOILE®
Unikátny patent
Stabilní Ozonidy

Otorig® nosový sprej je zdravotnícka pomôčka k uvoľneniu, ochrane, redukcii mikróbov a čisteniu nosových dutín. Je určený na prevenciu a podporu liečby akútnej i chronickej afekcie nosohltanu, pri podráždení, opuchu, svrbení, pálení, nadmernej tvorbe hľenu. Otorig® vytvára ochranný mukoadhezívny lipidový film a napomáha k obnoveniu optimálneho stavu nosovej sliznice.

HLAVNÉ SLOŽKY

Ozoile® (stabilné ozonidy), Aqua (ozonizovaná voda), Mentol, Chlorid sodný.

OZOILE®

Působí na podrážděné a svrbivé tkanivo, kterému dodává kyslík a vytváří prostředí, které zabraňuje změnám mikrobioty sliznice. Působí proti začervenání, svrbění, pálení, opuchu, deskvacii a proti rozvoji degenerativních procesů.

MENTOL

Osvěžující, analgetický a ulevující efekt.

CHLORID SODNÝ

Jeho přítomnost v roztoku podporuje osmózu vody z překrvené sliznice a tím uvolňuje hlien a uľahčuje jeho odstránění.

AKO FUNGUJE

Otorig® nosový sprej s Ozoile® je ochranná, dekongescíni a antimikrobiální zdravotnícka pomôčka pre nosovú sliznicu, špeciálne určená na prevenciu a liečbu akútnej i chronickej nasofaryngeálnej afekcie, charakterizovaných podráždením, opuchom, svrbením, pálením, nadmernou tvorbou. Inovatívny zloženie, ktoré pomáha v prípade chřipkového syndromu spôsobeného prechladnutím, alergiami alebo látkami v znečistenom životnom prostredí a tiež pred a po chirurgických zákrokoch v oblasti ORL. Otorig® nosový sprej uvoľňuje nosové cesty, snižuje zduření sliznice a reguluje sekreciu pomocou osmotické výměny, uvolňuje hlien a uľahčuje jeho odstránění. Jeho zloženie s Ozoile® udržuje sliznicu dobre hydratovanú a má dôležitý antimikrobiálny a ochranný účinnok. Vytvára mukoadhezívny lipidový film, ktorý chráni sliznicu pred negatívny zmenami mikrobioty,

čím zlepšuje stav nosových dutín.

AKO POUŽÍVAT

1) Odstráňte priehľadný ochranný kryt (a) a rozprašovač (b) tahom nahor.

2) Nasadte dávkovač nosového spreja (c) na píst.

Aplikujte Otorig® nosový sprej podľa potreby 1 alebo 2 vstřiky do každej nosovej dírky, jemne sa vysmrkajte a potom opakujte aplikáciu znovu.



Doporučame prípravok používať viackrát počas dňa, môžete aj s krátkým časovým rozostupom.

Pred spaním opakujte aplikáciu. Dávkovač po každom použití opláchnite prídom horúcej vody a zakryte ochranným víčkom. Pretože sa jedná o prírodní produkt a jeho farmakologický mechanismus účinku nie je návykový, je možné Otorig používať často a dlhodobo.

VAROVANIE A UPOZORNENIE

Uchovávejte mimo dosahu dětí. Nepoužívejte po vyprání expirácie. Nepoužívejte, ak je obal poškozený. Vyhnete sa kontaktu s očami, v prípade náhodného vniknutia, dôkladne opláchnite vodou. Případy precitlivosti alebo vedľajších účinkov nie sú známe, pokiaľ sa však objavia, prípravok ďalej nepoužívejte a poradte sa s lekárom. Pred použitím zdravotníckej pomôcky si dôkladne umyte ruky. Po použití fláštičku riadne uzavrite. Prípravok uchovávejte na suchom mieste mimo zdrojov tepla a slnečného žiarenia. Dátum expirácie sa vztahuje na nedotknutý a dokonale uchovaný prípravok. Po otvorení spotrebujte do 6 mesiacov.

BALENIE

Fláštička 20 ml



BEZ LEPKU
BEZ ALERGENŮ
BEZ FARBIV

Rev. 02 10/2021

Zdravotnícka pomôčka.
Výhradní distributor pre ČR a SR
EMPOLAS s.r.o., Česká republika
info@empolas.com
www.ozonidy.sk

Erbagil s.r.l. - Via L. Settembrini, 13
Telese Terme (Bn) - Italy
www.erbagil.com - info@erbagil.com